



产品特点：

- IntelliWeave™ 复合材料技术
- 防水 EnviroShell™
- 一体式塔架

质保检验和维护信息

College Park 建议按照以下质保检验计划安排病人进行假足检查。

病人体重和/或冲击力较大时可能需要更频繁的检查。
我们建议每次进行质保检验时，目视检查以下适用零件是否存在过度磨损和疲劳。

- 复合体和连接件
- CPI 短袜
- 脚壳

BREEZE 质保检验计划：每年检查一次。

技术协助/紧急服务 (24-7-365 全天候)

College Park 正常工作时间为周一至周五 8:30 AM – 5:30 PM (美国东部标准时间)。在此时间之外，您可以拨打紧急技术服务电话，联系 College Park 销售代表。



美国制造

COLLEGE PARK INDUSTRIES
27955 College Park Dr.
Warren, MI 48088 USA

EMERGO 欧洲
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, Netherlands

澳大利亚赞助商
EMERGO 澳大利亚
Level 20, Tower II
Darling Park
201 Sussex Street
Sydney, NSW 2000
Australia


©2017 College Park Industries, Inc. 保留所有权利。College Park 和 Breeze 为注册商标。IntelliWeave 和 EnviroShell 是 College Park Industries 公司的商标。

包装内容	建议工具
(1) 只 Breeze® 假足 (1) 个脚壳 (1) 只 CPI 短袜	4mm 六角扳手 FootHorn™




假足构件

下图帮助您熟悉 Breeze 的独特零件。这些零件在说明书中进行了引用说明，用于在寻求技术服务时参考。

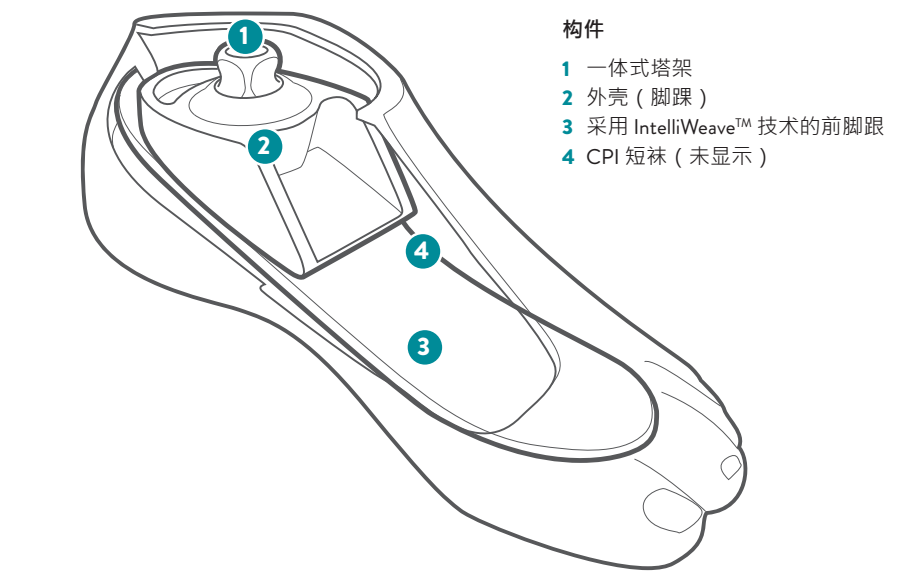

排水孔

薄层区域在 EnviroShell™ 底部。脱下脚壳，在指定位置钻或凿一个 1/4" (6mm) 直径的孔，形成一条排水通道。

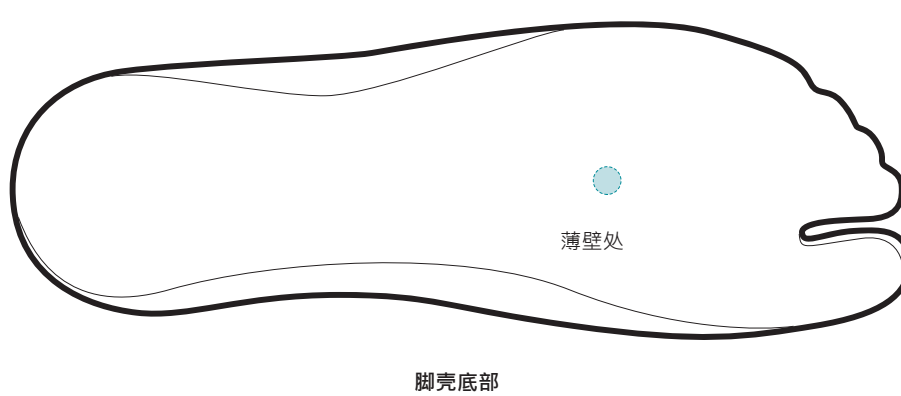

一般说明

安装

只能使用优质内骨骼构件。

组装和拆卸 (适用于短袜更换)

利用 FootHorn 套上和脱下脚壳。脱下 CPI 短袜，必要时进行更换。再次拆卸或改造产品构件会使质保失效。

静态校准

为发挥最佳功能，请将病人体重平衡置于前脚掌与脚跟之间。负载线在 1/3 脚跟杆至 2/3 脚趾杆处将假足一分为二。Breeze 脚跟设计凸起 3/8"。不穿鞋时需要进行调整。

动态调节

预期效果	校准方式变更
更紧致的脚趾反应	使 Breeze 产生跖屈，或向后移动负载线
更松弛的脚趾反应	使 Breeze 产生背屈，或向前移动负载线
更紧致的脚跟反应	使 Breeze 产生背屈，或向前移动负载线
更松弛的脚跟反应	使 Breeze 产生跖屈，或向后移动负载线

防潮

为维持 EnviroShell 和 CPI 短袜的寿命，接触水分之后务必彻底吹干假足。如果接触盐水或氯水，冲洗后吹干。

美化外观

如果会接触到水分，College Park 不建议对假肢外观进行美化。

警告

- 在某些情况下，在潮湿环境下使用可能会增大滑倒和跌倒风险。
- 褪下所有鞋袜，在阴凉、干燥场所风干。
- 请勿使本品接触腐蚀物质、盐水或极端 pH 环境。
- 灰尘等污染物及使用润滑剂或粉末可能会影响 CPI 短袜功能，使其产生噪音。
- 若不遵守该技术说明书或在有限质保范围之外使用本品，可能会对病人造成伤害或损坏产品。