



特点：

- 集成弹簧技术 (IST®)
- Intelliweave™ 复合技术
- 防水认证



保修期检查和维护信息

College Park 建议您安排您的病人根据以下保修期检查时间表进行检查。

大体重病人和/或冲击力水平高的病人可能需要增加检查频率。我们建议您在每次质保期检查中目视检查以下适用零件是否过度磨损和疲劳。

- 复合材料和转接器
- CPI 袜
- 假足套

SOLEUS 的质保期检查时间安排每年一次。

技术援助 / 应急服务 24/7/365

College Park 的正常办公时间为周一到周五 8:30 AM – 5:30 PM (美国东部标准时间)。下班后，可通过紧急技术服务号码联系 College Park 代表。



800.728.7950 | 586.294.7950 | college-park.com

美国制造 

COLLEGE PARK INDUSTRIES
27955 College Park Dr.
Warren, MI 48088 USA

EC REP EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, Netherlands

**澳大利亚赞助商
EMERGO AUSTRALIA**
Level 20, Tower II
Darling Park
201 Sussex Street
Sydney, NSW 2000
Australia


©2017 College Park Industries, Inc. 保留所有权利。College Park、Gait Matching、Soleus 和 Integrated Spring Technology (IST) 为 College Park Industries, Inc. 的注册商标。

套装内容	所需工具
(1) Soleus 假足 (1) 假足套 (1) 装饰性附着板 (1) CPI 袜 (1) 4 孔紧固件套件	(1) 4mm 六角扳手 建议 FootHorn



假足部件

该图表旨在帮助您熟悉 Soleus 的独有零件。这些零件贯穿本说明书始终，用于装配假足，在与 College Park 技术服务代表沟通时可能会被提及。

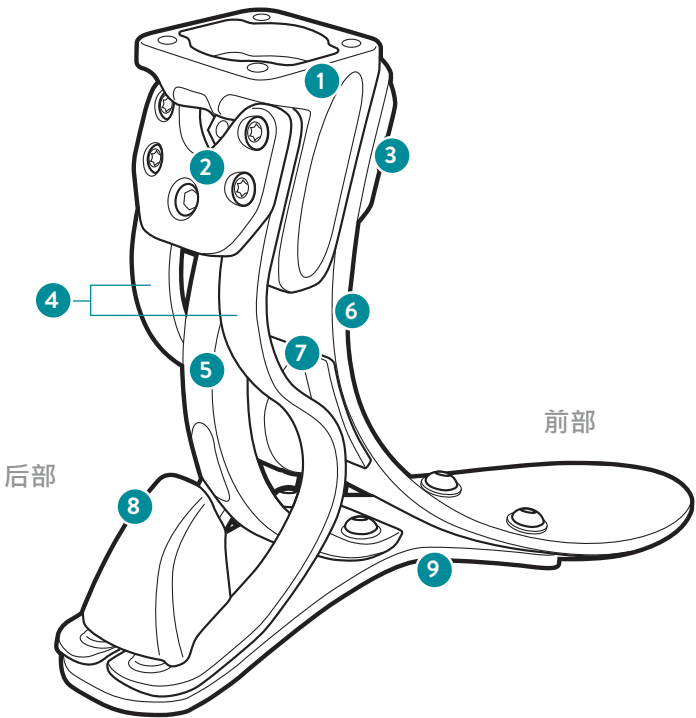

部件

- 1 外壳

2 足跟弹簧板

3 足尖弹簧板

4 足跟弹簧

5 中部弹簧

6 足尖弹簧
- 7 中部缓冲器

8 足跟缓冲器

9 调带材料

警告

- 请勿将本产品暴露于腐蚀性材料或极端 pH 值环境之中。
- 未遵守这些技术说明或将本产品用于有限保修范围之外可能导致病人人身伤害或产品损坏。

一般说明

安装

仅使用高品质的近端内骨骼部件。仅使用附带的安装紧固件，否则不予保修。

装配和拆卸（更换袜子）

使用 FootHorn 穿脱假足套。取下 CPI 袜并在必要时更换。对部件进行进一步拆卸或修改将不予保修。

静态对线

为实现最佳功能，使病人的体重在前脚掌和足跟之间保持平衡。承重线应该落在假足足跟杆三分之一处。

动态调节

理想结果	对线更改
要求更坚实的足尖响应	使 Soleus 脚背伸直或使承重线后移
要求更柔和的足尖响应	使 Soleus 背曲或使承重线前移
要求更坚实的足跟响应	使 Soleus 背曲或使承重线前移
要求更柔和的足跟响应	使 Soleus 脚背伸直或使承重线后移

安装紧固件指南

转接器不同，紧固件的长度也有所不同。旋转式转接器使用 M6 x 16mm 紧固件，而非旋转式转接器使用 M6 x 14mm 紧固件。

紧固件选择	潜在结果
螺纹长度过短	螺纹啮合方式不正确
螺纹长度过长	触底或卡住

注意

- 在所有 4 孔紧固件螺纹上涂抹 Loctite® 242®。
- 均匀紧固至 12 N·m (8.8 ft·lbs)。

不遵守这些指南可能导致以下现象：
噪声、移动、损坏和灾难性失效。

步态匹配指南

如果您有关于步态匹配修改方面的问题，请联系 College Park 技术服务部。